

Как использовать HARZ Labs Glaze?

HARZ Labs Glaze — высокоглянцевая УФ-отверждаемая глазурь на уретан-акриловой основе. Не содержит метилметакрилата и других прекурсоров. Предназначена для покрытия моделей временных коронок и мостов на срок до 2 месяцев. Обладает высокой износостойкостью, низким водопоглощением, оптической прозрачностью. Отверждается без липкого слоя на воздухе, не требует дополнительной полировки после отверждения. HARZ Labs Glaze имеет высокую адгезию к ПММА и также подходит для фрезерованных конструкций.



Инструкция по нанесению

Обезжирить окрашиваемую поверхность изопропиловым или этиловым спиртом перед нанесением лака. Нанести лак на поверхность кистью, выдержать не менее 60 сек (в зависимости от толщины наносимого слоя) для достижения полного растекания и удаления растворителя с поверхности. Засветить изделие УФ источником света (405 нм, 4,9 мВт/см²) в течение не менее 10 мин. По окончании отверждения изделие не должно иметь липкого слоя. Не наносить материал в ротовой полости.